

12 april 2024

Het kleine rode staafje is de magneet van de nieuwe zender. Vanaf dit jaar produceert Sigloo volledig nieuwe zenders. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van de vorige zenders:

1. Een enkele laadbeurt is geschikt voor 10-30 bevallingen.
2. Opladen gebeurt zonder metalen contacten. Er zijn dus geen metalen connectoren nodig, wat de duurzaamheid van de zender op de lange termijn zou verbeteren.
3. De magneet zit niet vast in de zender. De zender moet op de linker vulvalip genaaid worden en de lange rode magneetstang op de rechter vulvalip, zo dicht mogelijk bij de zender. Op deze manier kan het tijdens het veulenen niet gebeuren dat de magneet vast komt te zitten in de zender en snijden de draden niet in het vulvaweefsel. Het alarm gaat 8-15 seconden na het verwijderen af.

**OM DE TRANSMITTER IN TE NAAIEN:**

De bovenste lijn van de zender moet op dezelfde hoogste als de bovenste hoek van de vulva.

Zodanig dat de zender en de magneet niet bewegen ten opzichte van elkaar tijdens het plassen en in andere situaties. Het is belangrijk dat de magneet niet lager is dan de zender, het is beter als hij hoger is.

Belangrijk: tijdens het testen begint het alarm ook 8-15 seconden na het verwijderen van de magneet.

Als de transmitter niet gebruikt wordt, moet hij apart van de magneet worden bewaard (op minstens 20 cm afstand van elkaar). Hij moet alleen samen met de magneet zijn als hij op de merrie is gestikt. Zo blijft het oplaadniveau jarenlang hoog.

